




*Gebrauchsanweisung*  
***Alkohol-Tester***  
*Art.-Nr. 21.499*




### **Allgemeine Hinweise:**

- Führen Sie den Test ca. 20 Minuten nach Verzehr alkoholischer Getränke durch. Erst dann ist der Alkohol in das Blut gelangt.
- 20 Minuten vor dem Test nach Möglichkeit nicht rauchen und essen.
- Das Gerät nicht mit chemischen Mitteln reinigen.
- Den Sensor vor Flüssigkeiten schützen.
- Die Alkoholwert-Angabe dient lediglich als Anhaltspunkt.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung.

1. Kappe auf der Rückseite nach unten schieben und 2x AAA / 1,5 V Batterien einsetzen.

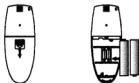


2. Nach Drücken der Power Taste erscheint im LCD – Display „Warm up“ und ein Countdown für 10 Sekunden. Nach Ablauf der Zeit, ist das Gerät einsatzbereit.

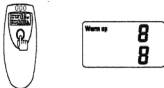


3. Wenn im Display das Wort „**Blow**“ erscheint, halten Sie das Gerät dicht an Ihren Mund und pusten für etwa 3 - 5 Sekunden hinein.



4. Nach einer kurzen Wartezeit erscheint das Ergebnis im Display. Ab einem Alkoholwert von 0,02 % BAC bzw. 0,2 g/l erscheint das „**Caution**“ Symbol im Display.

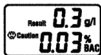


5. Ab einem Alkoholwert von 0,05 % BAC bzw. 0,5 g/l erscheint das „**Danger**“ Symbol im Display.

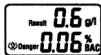

6. Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Sekunden eigenständig aus.

**Tipp:**

**Um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen, empfiehlt der Hersteller den Test 2 mal zu wiederholen.**

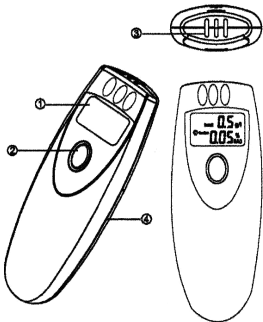

- 1 LCD-Display**
- 2 Anschalter**
- 3 Mundstück zum Pusten**
- 4 Batteriefach**

Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 • [www.filmer.de](http://www.filmer.de)